

介護保険
レンタル
対応

車いす用クッション アウルサポート


車いす上で長い時間座るには、快適な姿勢を保持し続けられることが大切です。
アウルサポートはあらゆる体格や座位に対応し、
骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション。
やさしく包み込むようにサポートし、車いすでの毎日を快適に。



対象者

- 自力での体幹保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

座位保持を実現する
シートクッションとバッククッション。

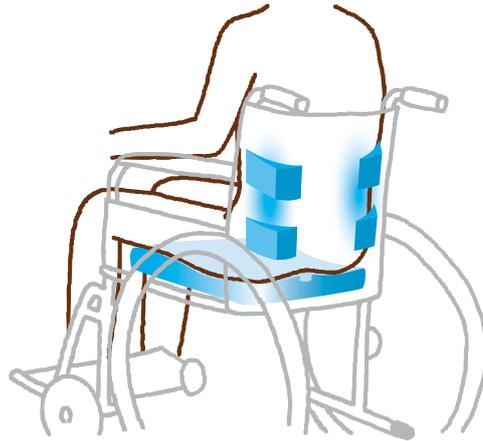

エクスジェルが身体をやさしくサポート。



■シートクッションの特長

内蔵されたエクスジェルが体圧を分散し、快適な座り心地。



アウル・スリット/アウル・アイ
アウル・スリットが尾骨部から仙骨部、アウル・アイが坐骨部にかかる圧力を効果的に減圧。



アウル・アンカー
前ずれしにくいアンカー形状で安定した着座姿勢をサポート。



底面テーパ形状
クッション底面はテーパ形状(船底形状)を採用し、車いすのスリングシートとのフィット性が良好。



柔軟なエクスジェル
クッション内蔵のエクスジェルが体圧を分散し、床ずれのリスクを軽減。

■バッククッションの特長

きめ細かい位置調整であらゆる体格・座位に対応。



アウル・ウイング
エクスジェルが背骨の痛みを緩和し、床ずれのリスクを軽減。



アウル・アジャスタブルパッド
腰パッド、背パッドは面ファスナーで取り外しが可能。



調整機能
位置調整可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。




取付けかんたん
取付け方はベルトで車いすに固定するだけ。




アウルサポートバッククッション取付けについて

- ① 車いすへのセットが簡単 ② 体格に合わせて、パッド調整が自由自在 ③ カバーも取付けラクラク

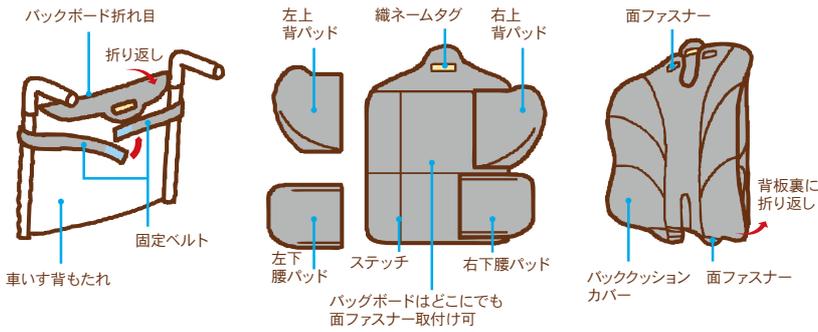

車いすへの装着例

状況に合わせたパッドの装着バリエーションをご紹介します。

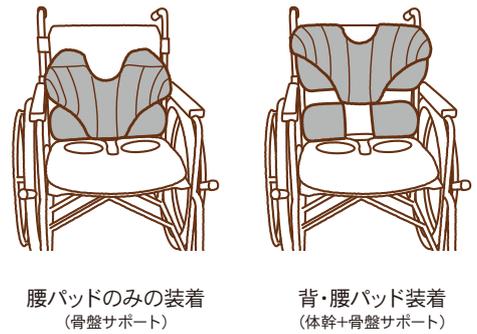

より快適に、より清潔に、機能と素材にとことんこだわりました

カバーについて

製品には洗濯可能な専用ストレッチ性カバーが付属します。さらっとした風合いで蒸れを防ぎます。カバーの素材はアメリカの医療機器に要求される難燃性試験 (CA Technical Bulletin117) に合格しています。シートクッションカバー着座面の裏側には断熱層を加え、防水機能のあるフィルムをラミネートしており、失禁などにも対応できます。また、ご家庭の洗濯機で洗えますのでお手入れが簡単で衛生的です。(クッション本体は洗濯機での洗浄はできません)

滑り止め (裏材)

シートクッション本体底面、カバー底面には滑り止め加工を施し、クッションのずれ落ちを防ぎ、安定した着座姿勢をサポートします。



カバー・本体のお手入れ方法と消毒方法

簡単なお手入れで清潔に長期間大切に使用いただけます。

- **カバー** 取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします)
- **クッション本体** ... 汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。

※お手入れ方法は取扱い説明書をご確認ください。

● 腰後部パッド装着例

腰後部の隙間が気になる方には腰後部パッドのご使用がおすすめです。(腰後部パッドは別オプションです。)



後部パッド装着例

品名	アウルサポートバッククッション		アウルサポートバッククッションオプション			
	アウルサポートバッククッション	アウルサポートシートクッション	替え・背パッド (2個セット)	替え・腰パッド (2個セット)	腰後部パッド	
品番	セット OWLS-S01B01	OWLS-S01	OP-PD-BA-OWLS-B01	OP-PD-WT-OWLS-B01	OP-PD-WB-OWLS-B01	
JANコード	セット 4544511013174	4544511013136	4544511013198	4544511013181	4544511013273	
TAISコード	セット 00540-000017	00540-000016	-	-	-	
介護保険・レンタル対応	○	○	-	-	-	
ポリエステル標準カバー	○	○	-	-	-	
寸法 (mm)	W	480	400	125	140	340
	D	120	400	180	135	50
	H	365	前 70 中 55 後 50	110	90	130
製品重量 (約・kg)	1.4	1.2	-	-	-	
希望小売価格 (税込)	本体+カバー	¥21,000	¥21,000	¥4,200	¥2,625	¥3,675
	替えカバー	¥4,200	¥4,725	-	-	-