


エクスジェル®アウル円座 取扱説明書

この度はエクスジェル® アウル円座をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、アウル円座を正しく、安全にお使い頂くための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

仕様

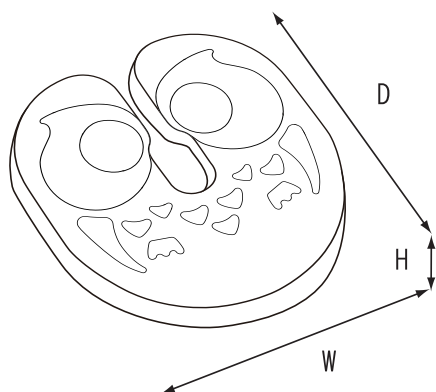

※製品には専用カバーが付属します。イラストは専用カバーを外した状態です。

品名	エクスジェル®アウル円座	
品番	ベージュ：ARK-20-BE, ブラック：ARK-20-BK	
サイズ(mm)	W	380
	D	390
	H	40
重量(kg)	約0.9	

カラー	本体：ブラウン / カバー：ベージュ, ブラック		
材質	本体	表材	クロロプレナム・ナイロン100%
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
	カバー	表材	ポリエステル97%, ポリウレタン3%
裏材		滑り止め加工付きポリエステル	
品番(オプション注文用)	ベージュ：OP-CV-ARK-20-BE, ブラック：OP-CV-ARK-20-BK		

正しい使い方

■ アウル円座の設置方法

- クッション本体に専用カバーを装着します。
その際カバーは滑り止めが下側に、本体は凹凸面が上側になるようにセットしてください。

※カバーはブランドタグが正面左側にファスナーが前側になるように装着してください。


※カバー前側のファスナーより入れてください。

- いす、車いすなどの上に右図のようにクッション本体のアウルの足の形が前頭が後ろになるように置いてください。

※カバーのファスナーが前側になります。

- 最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の中央部分にくるように座ってください。

※製品には専用カバーが付属します。

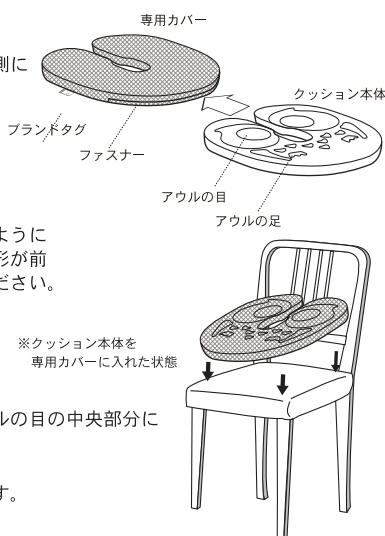

お手入れ方法

■ カバー

- 取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします)
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 色物は色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- 煮沸消毒、アイロンかけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■ クッション本体

- 汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意ください。

△安全上の注意事項

- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 摂氏80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。

- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 廃棄する場合は、各自自治体のルールに従い処理してください。
- 保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。
- カバー裏材の滑り止め樹脂は、塩化ビニル製品やソファや床等に使用されている一部ワックス剤等、可塑剤を含有する製品と長時間密着させないでください。滑り止め樹脂が変質する恐れがあります。

EXGEL®
kaji corporation
<http://www.kaji-web.co.jp/>
エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。
アウルは株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本
■ 製造元 株式会社 加地
横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33
サウス・コア内
TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282
けいはんなR&Dセンター、京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853