

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくため、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ5~10倍ほど高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

*衝撃吸収テスト結果：環境温度17℃ 直径100mm・5kgの鉄球を試料表面から3cmの高さから自由落下。〈財〉日本車両検査協会調べ〉

身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場 TEL : 0854-54-2288
〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1295-3 FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所 TEL : 0774-98-2633
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7 FAX : 0774-95-3853

横浜営業所 TEL : 045-482-3551
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内 FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○アウル®は株式会社加地の登録商標です。
○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

OWL21/22/23/24-INS-JP01

<http://www.exgel.jp/>

ア ウ ル リ ハ

Owl REHA

取扱説明書



レギュラー



ハイ



3Dレギュラー



3Dハイ

安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

クッションの特長

EXGEL®



- ・アウルREHAは利用者の体格や症状に合わせて4種類の形状から選んでご利用いただけます。
- ・ふくろうのデザインは臀部を効果的に減圧する機能性から導かれたデザインです。
- ・アウルアイが最も圧力のかかる坐骨部を包みこむようにサポートして効果的に減圧します。
- ・本体表面はしなやかでストレッチ性に優れた合成皮革を使用しており、表面が汚れてもメンテナンスが簡単です。


■専用カバー

- ・表面がさらっとした風合いのストレッチ性カバーでムレを防ぎます。
- ・防水機能のあるフィルムをラミネートしています。
- ・専用カバーは着脱可能でお洗濯いただけます。
- ・底面は滑り止め加工されており、使用中の不快感を防止します。

正しい使い方

■ 設置方法

- ① クッション本体に専用カバーを装着します。その際クッション本体は凹凸面が上側に、専用カバーは滑り止めが下側になるようイラストのように装着してください。

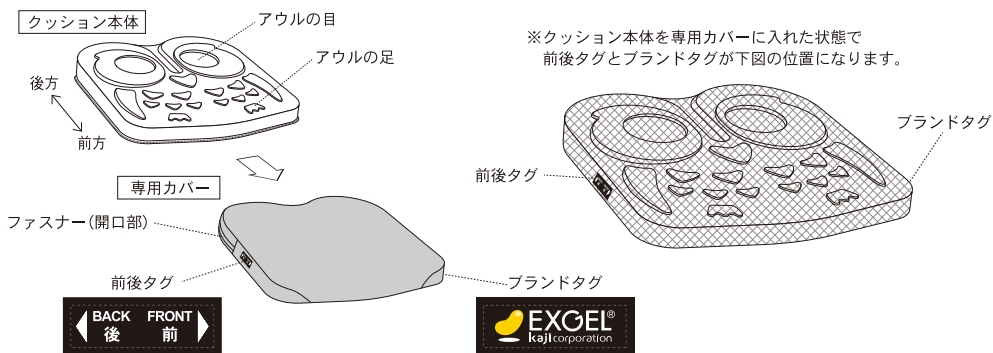

※専用カバー後ろ側のファスナー(開口部)より前後方向を確認して入れてください。

- ② 車いすの上に右図のように前後タグの表記に従って設置してください。クッション本体のアウルの足が前方、アウルの頭が後方になります。

※このクッションには前後方向があります。専用カバーのファスナーが後ろ側(背中側)になります。

- ③ 最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の中央部分にくるように座ってください。

※移乗の際は身体をしっかり支え、転倒や転落に充分にご注意ください。

※クッションの厚さにより車いすのフットレストの高さ調整などを行ってください。

△クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

お手入れ方法

■ 専用カバー

- ・取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします。)
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンかけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■ クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ 消毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
- ・原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。



△安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷さを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。
- ・クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、専用カバー裏材の滑り止め樹脂が削れる場合がありますのでご注意ください。

製品スペック

製品/付属品内容：アウルREHA本体 1枚・専用カバー 1枚・取扱説明書(本書類) 1枚・保証書 1枚

品名	エクスジェル® アウル REHA			
	レギュラー	ハイ	3Dレギュラー	3Dハイ
品番	OWL21-BK1-4040	OWL22-BK1-4040	OWL23-BK1-4040	OWL24-BK1-4040
サイズ(mm)	W	400	400	400
	D	400	400	400
	H	40	80	(A) 75 (B) 72 (C) 53 (D) 68
重量(kg)	約1.2	約1.4	約1.7	約1.9

カラー		本体：グレー / カバー：ブラック	
材質	本体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	カバー	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン