


エクスジェル®アウルクッション 取扱説明書

アウル40プラスレザー 底面テーパー、アウル40プラスレザー、アウル40レザー

この度はエクスジェル®アウルクッションシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、アウルクッションを正しく、安全にお使い頂くための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

仕様

品名	アウル40 プラスレザー 底面テーパー	アウル40 プラス レザー			アウル40 レザー		
		標準幅	380幅	360幅	標準幅	380幅	360幅
品番	OWL40P-LT	OWL40P-L	OWL40P-L-380	OWL40P-L-360	OWL40-L	OWL40-L-380	OWL40-L-360
サイズ(mm)	W	400	400	380	400	380	360
	D	400	400	400	400	400	400
	H	前75/中60/後75	前55/中40/後55	前55/中40/後55	前55/中40/後55	40	40
重量(kg)	約1.5	約1.3	約1.2	約1.1	約1.2	約1.1	約1.0
JANコード	4544511012726	4544511012733	4544511013235	4544511013242	4544511012740	4544511013259	4544511013266
TAISコード	00540-000014	00540-000013	00540-000013	00540-000013	00540-000012	00540-000012	00540-000012

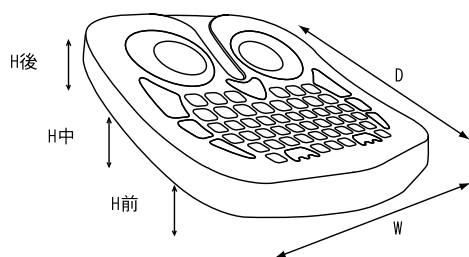


※製品には専用カバーが付属します。イラストは専用カバーを外した状態です。

カラー		本体：ベージュ / カバー：ブラック	
材質	本体	表材	ウレタン合成皮革
		中材	エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン
	カバー	表材	ポリエステル100%・ウレタンフォーム
		裏材	滑り止め加工付きナイロン

正しい使い方

■ アウルクッションの設置方法

- クッション本体に専用カバーを装着します。その際カバーは滑り止めが下側に、本体は凹凸面が上側になるようにセットしてください。
- 車いすの上で下図のようにアウルの足の形が前になるように置いてください。

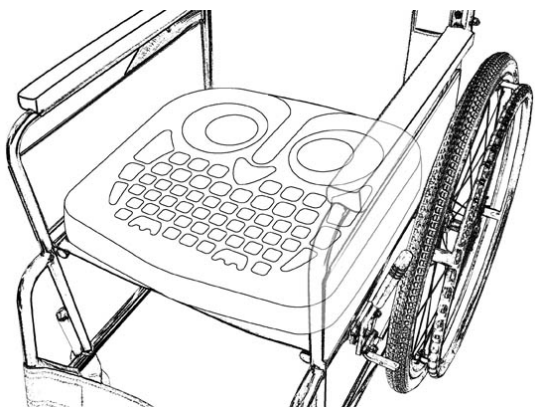

※製品には専用カバーが付属します。イラストは専用カバーを外した状態です。

お手入れ方法

■ カバー


- 取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします)
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。

■ クッション本体

- 汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- 強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意ください。

■ 消毒

- 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。原液のまま使用するとクッション表面が劣化する恐れがあります。
- 有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。
- 滅菌装置を使用する場合は温度80℃以下、2時間以内にしてください。

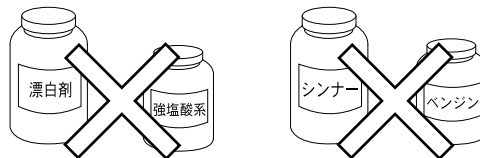

△安全上の注意事項

- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ジェルの特長上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 摂氏80度以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。

- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 廃棄する場合は、各自自治体のルールに従い処理してください。
- 保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。

EXGEL®

KAJI corporation ●●●●

<http://www.kaji-web.co.jp/>

EXGEL®/エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。
アウルは株式会社加地の登録商標です。

■ 製造国 日本

■ 製造元 株式会社 加地

横浜営業所

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33

サウス・コア内

TEL : 045-482-3551 FAX : 045-482-3552

本社/工場

〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3

TEL : 0854-54-2288 FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター、京都営業所

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7

TEL : 0774-98-2633 FAX : 0774-95-3853