

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場 TEL : 0854-54-2288
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3 FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所 TEL : 0774-98-2633
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7 FAX : 0774-95-3853

横浜営業所 TEL : 045-482-3551
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内 FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

BAC01-INS-JP01

<http://www.exgel.jp/>

車いす用姿勢保持クッション

エクスジェル®バッククッション ロータイプ

取扱説明書




安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

クッションの特長

調整が必要なく、置くだけで使用可能な車いす用バッククッションです。比較的座位が保てる方に推奨します。

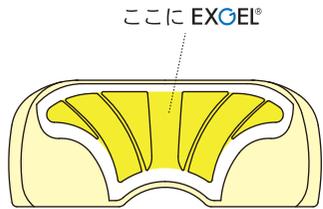

- ・骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定。
- ・仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。
- ・圧力のかかる骨盤と仙骨部にエクスジェルを配置し負荷を軽減します。
- ・腰後部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中の圧力を軽減します。

■ 専用カバー


- ・表面がさらっとした風合いのストレッチ性カバーで蒸れを防ぎます。
- ・カバーの素材はアメリカの医療機器に要求される難燃性試験(CA Technical Bulletin 117)に合格しています。
- ・専用カバーは着脱可能でお洗濯いただけます。

正しい使い方


■ 設置方法

車いすの上に下図のように前後上下タグの表記に従って設置してください。このクッションには前後方向があります。専用カバーのファスナーが後ろ側(車いす側)になります。

シートクッションと併用される際は、シートクッションの上にバッククッションを設置してください。

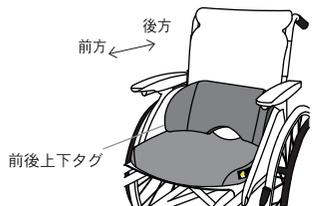

※クッション本体を専用カバーに入れた状態で前後上下タグ、ブランドタグが下図の位置になります。

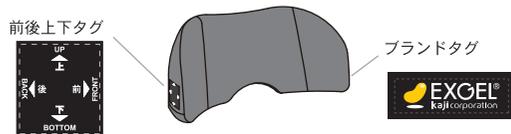


■ 座り方

バッククッションと腰にすき間ができないよう奥まで深くしっかり座っていただくと背もたれと腰の隙間を埋めて骨盤の後傾を抑制し、自然な姿勢をサポートします。

⚠ クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。


■ 本体カバーの取り外し方法

- ①本体カバー後側のファスナーを開きます。
- ②本体カバーの底部を開きます。
- ③本体カバーを取外します。

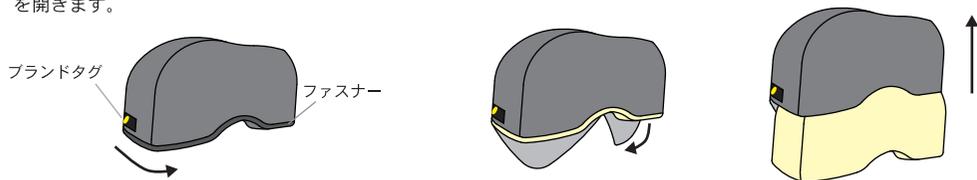

■ 本体カバーの取り付け方法

- ①GELシートと反対側にファスナーが来るように本体カバーを被せます。
- ②本体カバーの底部を閉じます。
- ③本体カバー後側のファスナーを閉じます。

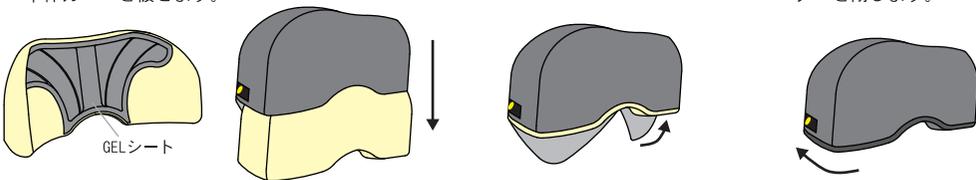

お手入れ方法

■ 専用カバー

- ・取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします) 面ファスナーは生地を傷める恐れがありますので貼り合わせて洗濯してください。
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■ クッション本体

- ・GELシートが汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ クッション本体のおことわり

- ・ウレタン特有のにおいがする場合がありますが、徐々になくなってまいります。
- ・ウレタン表面に製造上小さな凹みが複数ある場合がありますが、使用上問題ありません。
- ・ウレタンは時間の経過とともに変色しますが、使用上問題はありません。

■ 消毒

- ・消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- ・消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- ・有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。



安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ・ジェル特性上、高温時の蒸れや低温時の冷さを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。

製品スペック

製品/付属品内容：クッション本体 1個(本体カバー付) ・取扱説明書(本書類) 1枚 ・保証書 1枚

	品名	エクスジェル®バッククッション ロータイプ		
	カラー	カバー：ブラック		
	材質	GELシート	表材	ウレタン合成皮革
			中材	エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム
品番	本体	ウレタンフォーム		
	カバー	ポリエステル100%		
品番	ロータイプ	サイズ	W400×D140×H180 (mm)	
	BAC01-BK	重量	約0.5kg	

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高機能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせ柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ10倍以上の高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3
TEL : 0854-54-2288
FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7
TEL : 0774-98-2633
FAX : 0774-95-3853

横浜営業所
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内
TEL : 045-482-3551
FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

BAC02-INS-JP01

車いす用姿勢保持クッション

エクスジェル®バッククッション ハイタイプ

取扱説明書




安全に正しくお使いいただくために

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、
使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

クッションの特長

調整が必要なく、置くだけで使用可能な車いす用バッククッションです。円背、骨盤後傾が進行し体幹の崩れやすい方に推奨します。

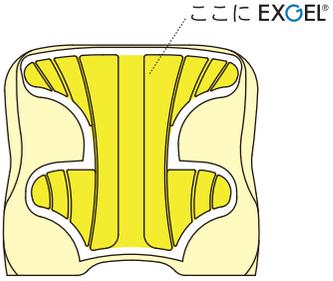

- 骨盤と胸郭を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。
- 圧力のかかる骨盤、仙骨、脇および背骨周辺にエクスジェルを配置し負荷を軽減(特に骨突出部の褥瘡リスクを軽減)します。
- 背中全体で体重を支えるため座面(坐骨)の圧力を軽減します。

■ 専用カバー

- 表面がさらっとした風合いのストレッチ性カバーで蒸れを防ぎます。
- カバーの素材はアメリカの医療機器に要求される難燃性試験(CA Technical Bulletin 117)に合格しています。
- 専用カバーは着脱可能でお洗濯いただけます。

正しい使い方

■ 設置方法

車いすの上にて下図のように前後上下タグの表記に従って設置してください。このクッションには前後方向があります。専用カバーのファスナーが後ろ側(車いす側)になります。

シートクッションと併用される際は、シートクッションの上にバッククッションを設置してください。



※クッション本体を専用カバーに入れた状態で前後上下タグ、ブランドタグが図の位置になります。


■ 座り方

バッククッションと腰にすき間ができないよう奥まで深くしっかり座っていただくと背もたれと腰の隙間を埋めて骨盤の後傾を抑制し、自然な姿勢をサポートします。

- クッションご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。


■ 本体カバーの取り外し方法

- ①本体カバー後側のファスナーを外します。
- ②本体カバー後側の開口部を開きます。
- ③ベルトの面ファスナーを外します。
- ④ベルトを引き抜きながら本体カバーを取外します。

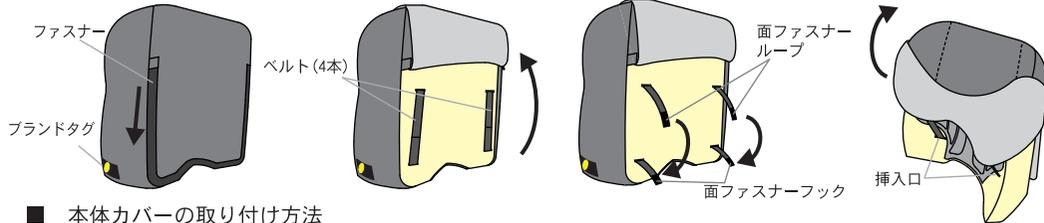

■ 本体カバーの取り付け方法

- ①クッション本体のGELシート側から挿入口にベルトを差し込み本体カバーを被せます。
- ②ベルトの面ファスナーを貼り合わせます。
- ③本体カバー後側の開口部を閉じます。
- ④本体カバー後側のファスナーを閉じます。

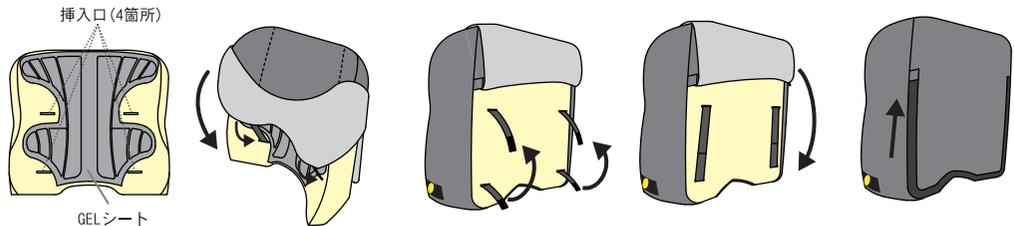

お手入れ方法

■ 専用カバー

- 取り外した専用カバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします) 面ファスナーは生地を傷める恐れがありますので貼り合わせて洗濯してください。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- 色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- 煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■ クッション本体

- GELシートが汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- 水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- 洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

■ クッション本体のおことわり

- ウレタン特有のにおいがする場合がありますが、徐々になくなってまいります。
- ウレタン表面に製造上小さな凹みが複数ある場合がありますが、使用上問題ありません。
- ウレタンは時間の経過とともに変色しますが、使用上問題はありせん。

■ 消毒

- 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ります。
- 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。原液のまま使用すると製品表面が劣化する恐れがあります。
- 有機溶剤(シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。



安全上の注意事項

- 疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- 製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- 水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- 本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- 80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- 長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- 製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を開けて使用しないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。

製品スペック

製品/付属品内容：クッション本体 1個(カバー付) ・取扱説明書(本書類) 1枚 ・保証書 1枚

	品名	エクスジェル®バッククッション ハイタイプ		
	カラー	カバー：ブラック		
	材質	GELシート	表材	ウレタン合成皮革
			中材	エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム
品番	本体	カバ	ウレタンフォーム	
		カバー	ポリエステル100%	
ハイタイプ BAC02-BK	サイズ	W400×D170×H380 (mm)		
	重量	約1.1kg		