

エクスジェルってどんなもの？

医療福祉分野からベビー用品、モータースポーツの最前線まで。エクスジェルは様々な分野で高く評価されています。わたしたちはお客様の満足と安心に少しでも近づくために、高性能素材EXGEL(エクスジェル)をベースとした商品を創造し、新しい商品開発に挑戦を続けます。



人肌のような心地よさ

エクスジェルの人肌のような柔らかさは、リラックスした感触を与えてくれます。

身体を柔軟にサポート

人の荷重がかかった際、エクスジェルは身体の形に合わせて柔軟に変形し、包み込むように身体をサポートします。

優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なり発泡していない(スポンジ状ではない)ため座ったときの底突き感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ5~10倍ほど高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。エクスジェルは薄くても身体に伝わる衝撃を抑えることができます。

*衝撃吸収テスト結果：環境温度17℃ 直径100mm・5kgの鉄球を試料表面から3cmの高さから自由落下。〈財)日本車両検査協会調べ〉

身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。



kaji corporation

■ 製造元 株式会社 加地 ■ 製造国 日本

本社 / 工場 TEL : 0854-54-2288
〒699-1511 鳥根県仁多郡奥出雲町三成1295-3 FAX : 0854-54-2282

けいはんなR&Dセンター / 京都営業所 TEL : 0774-98-2633
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3-2-7 FAX : 0774-95-3853

横浜営業所 TEL : 045-482-3551
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33サウス・コア内 FAX : 045-482-3552

○エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。○アウル®は株式会社加地の登録商標です。○掲載商品の仕様・デザイン・スペック等は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と多少色、仕様が異なる場合があります。○サイズなどは多少の個体差があります。

AZK-30-INS-JP05

アウル ライト
OWI® Lite


取扱説明書



安全に正しくお使い頂くために

この度はエクスジェルアウルクッションシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書には、アウルクッションを正しく、安全にお使い頂くための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

クッションの特徴

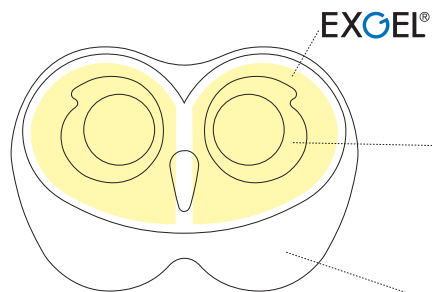

- ・折りたたみができる軽量・コンパクトな本体にエクスジェルを搭載しています。
- ・アウルアイが最も圧力のかかる坐骨部を効果的に分散します。
- ・底面には滑り止め効果の高い合成皮革を使用しカバーとのずれを防止します。
- ・前方部を薄くし、着座時の大腿部の圧迫感に配慮しています。

※製品には専用カバー・ゴムベルトが付属します。イラストは専用カバーを外した状態です。


■カバー

- ・自然な風合いのカバーは着脱可能で、お洗濯いただけます。
- ・裏面は滑り止め加工されており、使用中の不快感を防止します。


正しい使い方

■設置方法

- ① クッション本体に専用カバーを装着します。その際本体は凹凸面が上側に、カバーは滑り止めが下側になるように装着してください。

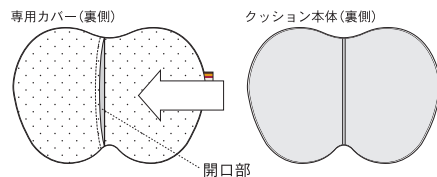


※カバーはブランドタグが正面左側になるように装着してください。
※カバー裏側の開口部より入れてください。

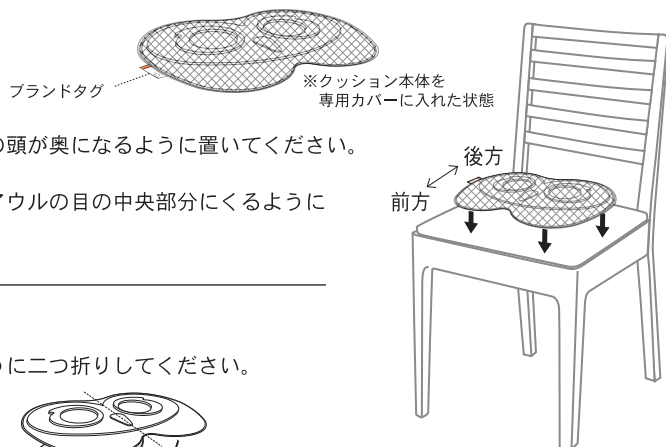

- ② いすに右図のようにアウルの頭が奥になるように置いてください。
- ③ 最も圧力のかかる坐骨部がアウルの目の中央部分にくるように座ってください。

■折りたたみ方

- ① 滑り止め側が内側になるように二つ折りしてください。

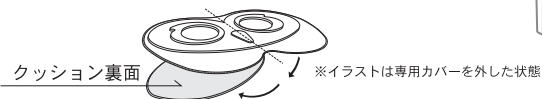

※必ず製品中央の折り曲げラインに沿って折りたたんでください。
※反対方向には絶対に折り曲げないでください。シワが出来る場合があります。

- ② ゴムベルトをかけます。



※本製品には専用カバーが付属します。説明のためイラストは専用カバーを外した状態で表示しております。実際に使用される際には専用カバーを装着のうえご使用ください。

お手入れ方法

■カバー

- ・取り外したカバーは、家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をお勧めします)
- ・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。
- ・色落ちすることがありますので、白物と一緒に洗わないでください。
- ・煮沸消毒、アイロンがけ、ドライクリーニング、乾燥機の使用はできません。



■クッション本体

- ・汚れた場合は水またはお湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ります。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機等は使用できませんのでご注意願います。

△安全上の注意事項

- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保障するものではありません。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・水周り(お風呂等)で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・80℃以上の高温な場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・ご使用になる場所やご使用方法、洗濯の方法等により、カバー裏材の滑り止め樹脂が割れる場合がありますのでご注意ください。
- ・カバー裏材の滑り止め樹脂は、塩化ビニル製品やソファや床等に使用されている一部ワックス剤等、可塑剤を含有する製品と長時間密着させないでください。滑り止め樹脂が変質する恐れがあります。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- ・長期間クッションの上に重量物を置かないでください。クッション表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに平らに置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。

製品スペック

製品/付属品内容：アウルライト本体 1枚・専用カバー 1枚・ゴムベルト 1本・取扱説明書(本書類) 1枚

	品名	エクスジェル アウルライト		
	カラー	本体：ブラウン / カバー：ベージュ・ブラック		
	材質	本体	表材	クロロプレンゴム・ナイロン100%
			中材	エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム
	裏材	ウレタン合成皮革		
	カバー	表材	ポリエステル97%、ポリウレタン3%	
		裏材	滑り止め加工付きポリエステル	
品番	ベージュ	サイズ	W380×D270×H17 (mm)	
	AZK-30-BE	重量	約0.4kg (カバー、ベルト含む)	
品番	ブラック	サイズ	W380×D270×H17 (mm)	
	AZK-30-BK	重量	約0.4kg (カバー、ベルト含む)	